



PROTOCOLO MANTENIMIENTO INCUBADORA DE TRANSPORTE

1. Definición

Conjunto de actividades de enfermería encaminadas al correcto mantenimiento de la Incubadora de transporte de Hospital de Calahorra, ubicada en Sala Piolín (Hospitalización Quirúrgica).

2. Descripción del Procedimiento

Actividades a realizar por el personal de Enfermería de planta :

DIARIA (TURNO NOCHE)

- **Comprobación de aire y oxígeno:** El Personal sanitario debe comprobar las bombonas de aire y de oxígeno. La capacidad de éstas tiene que estar por encima de 150, sino avisar a mantenimiento para que proceda a su cambio. Las bombonas tienen que estar cerradas y las conexiones puestas en la cabecera de la cama, al oxígeno(blanca) y al aire medicinal (negra).

No tocar la ruleta de la presión de aire (tiene que mantenerse entorno a 5)

- **Temperatura:** Anotar la temperatura de la incubadora. Mantener en la temperatura predispuesta por Servicio de Pediatría. La recomendación es de 35 °C.
- **Baterías :** Comprobación de baterías de la incubadora. **Batería 1 y Batería 2.** Deben estar cargadas. Para su comprobación, retirar la conexión a la red eléctrica durante 1 minuto para comprobar que se mantienen las baterías cargadas y volver a conectar a red.
- **Enchufe :** El personal sanitario debe comprobar que esté la incubadora enchufada a la corriente eléctrica de la sala.
- **Tubuladuras y filtros:** El personal de Enfermería comprobará que las tubuladuras y el filtro están en condiciones óptimas para su uso.



CADA QUINCE DIAS

- **Cambio de tubuladuras;** El personal sanitario debe de cambiar las tubuladuras del respirador de la incubadora y protegerlo. Se dejará montada el Kit de Ventilación Invasiva.

Actividades a realizar por otros Servicios :

ANUAL:

- Revisión incubadora. La empresa será la encargada de enviar a un técnico especialista para realizar una comprobación de la Incubadora de transporte. Así como el servicio Electromedicina de FHC.

REGISTRO DE ENFERMERÍA:

Se registrará la fecha que se realicen las actividades, indicando quién las ha realizado y firmándolas en el registro de las tareas del personal de enfermería.

- Electromedicina de FHC.

4. Precauciones

- No frotar las superficies ni limpiar el sistema con disolventes orgánicos, halogenados o con base de petróleo, productos anestésicos, limpiacristales, acetona ni otros productos de limpieza agresivos.
- Todos los registros de firmas deberán estar ubicados en la carpeta de caducidades general de la planta.



5. Bibliografía

Manuales de instrucciones sobre funcionamiento y mantenimientos realizados por la casa comercial expendedora de la Incubadora de transporte.

Indicaciones realizadas por el Servicio de Medicina Preventiva de Hospital de Calahorra.

ANEXO 1

REVISIÓN INCUBADORA DE TRASLADOS

- **TODAS LAS NOCHES Y TRAS CADA TRASLADO**
- **REGISTRO**
 - **Volumen bala de oxígeno**
 - **Volumen bala de aire**
 - **Temperatura incubadora**
 - **Baterías cargadas (x2)**
 - **Incubadora enchufada a electricidad**
 - **Cambio de tubuladura INVASIVA c/15 días**

**REVISION INCUBADORA****REVISION INCUBADORA**

FECH A	PERSONA L	OXIGEN O	AIR E	T a	BATERIA S	RED ELECTRIC A	CAMBIO TUBULADUR A

