



PROTOCOLO CARRUSEL DE FARMACIA

1. Definición

Conjunto de actividades protocolizados y de calidad , para la utilización correcta del Carrusel de Farmacia en horario fuera de servicio de la misma , garantizando el buen funcionamiento del Carrusel con la máxima seguridad.

2. Objetivos

- Asegurar obtener la medicación necesaria para el paciente que no está disponible en la unidad de la que procede
- Saber utilizar el Carrusel de Farmacia de manera rápida y segura, para mantener segura la trazabilidad de la medicación a dispensar.

3. Personas Necesario

- Personal de Apoyo

5. Material Necesario

- Carrusel de Farmacia

6. Descripción del Procedimiento

El Carrusel de Farmacia es utilizado por el personal TCAE de Farmacia en Horario de Lunes a viernes de 8 a 22h , y sábados y algún festivo de 8-15h.

Se puede dar la situación de necesitar una medicación de Farmacia, ubicada en el Carrusel, nevera ó baldas, fuera de estos horarios, y tener que ser el personal de Apoyo el que tenga que desplazarse a la Farmacia para poder recogerlo.

A continuación enumeramos los pasos a seguir , para obtener la medicación solicitada:

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027



Comisión De Cuidados de Enfermería


1. Pantalla de inicio del Ordenador del Carrusel:



2. Pinchar doble “clik” en SGA Galys:



3. Se abrirá esta pantalla donde escribiremos el Ususario y la Contraseña, y le daremos a Aceptar.

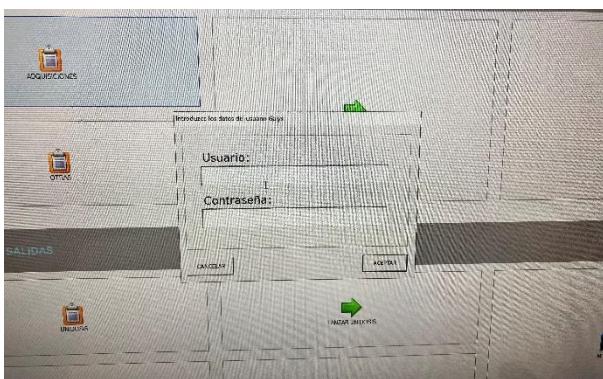

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023


Fecha de Implementación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027




Comisión De Cuidados de Enfermería

4. En la siguiente pantalla en PROCESOS DE SALIDA, pincharemos en OTRAS:

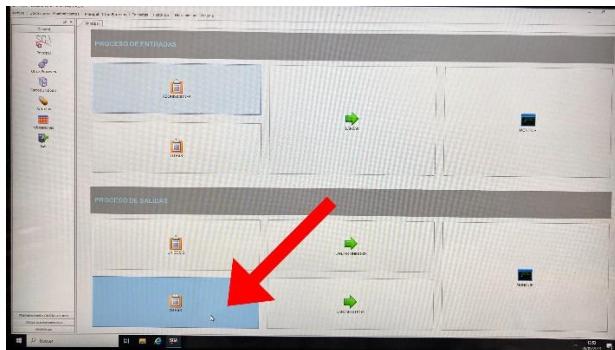

5. En la siguiente pantalla, pincharemos en Añadir

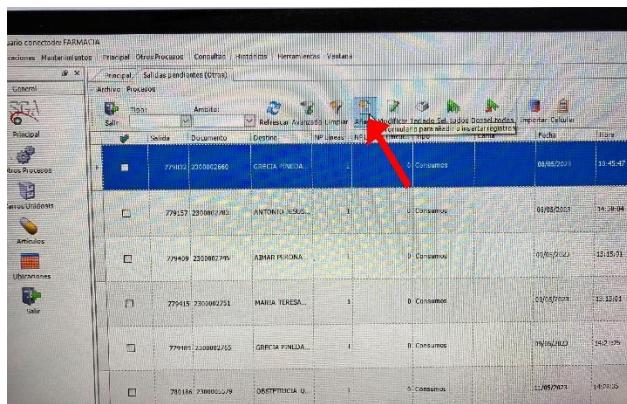

6. En la siguiente pantalla, tenemos que rellenar, del Servicio que procede el paciente y la Cama:

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implementación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027



Comisión De Cuidados de Enfermería

7. En la siguiente pantalla, pinchamos en Añadir línea:

This screenshot shows the 'Salidas de almacén' (Warehouse Exits) interface. At the top, there are buttons for 'Salir', 'Guardar', 'Cancelar', 'Imprimir', 'Ticket', 'Añadir línea', 'Calcular', and 'Calcular y Lanzar'. The 'Añadir línea' button is highlighted with a red arrow. The main area displays exit details: Documento (783.272), Nº Exitas Clínicas (1), SPM (SIN DEFINIR), and a list of clinical services. Below this, there are sections for 'Observaciones' (Comments), 'Caja' (Chest), 'Cod. Usuaria' (User Code), and 'Líneas de salida' (Exit Lines). The 'Líneas de salida' section includes fields for Artículo (Article), Descripción (Description), and Cantidad (Quantity).

8. En la siguiente pantalla, seleccionamos el Artículo que queremos y la cantidad

This screenshot shows the 'Linea de salida' (Exit Line) dialog box. It features a table with two columns: 'Artículo' (Article) and 'Cantidad' (Quantity). The 'Artículo' column lists various items from a dropdown menu. The 'Cantidad' column has a numeric input field set to 0. At the bottom, there are buttons for 'CANCELLAR' (Cancel), 'Denom.' (Denom.), 'ACEPTAR' (Accept), and 'ACEPTAR +' (Accept +).

9. Un vez llegamos aquí, seleccionamos la línea(en azul) y pinchamos en Calcular y lanzar

This screenshot shows the 'Salidas de almacén' (Warehouse Exits) screen again. The previously selected exit line is now highlighted in blue. A red arrow points to the 'Calcular y Lanzar' (Calculate and Launch) button in the top right corner of the toolbar. The rest of the screen displays the same exit details and lines as the previous screenshot.

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027




Comisión De Cuidados de Enfermería

Y nos aparece esta pantalla:

Si la viñeta aparece a la derecha de la pantalla, significa que la medicación está dentro del carrusel (CA).

Si la viñeta aparece a la izquierda de la pantalla, significa que la medicación está en la nevera (NV) o en las estanterías (EST)

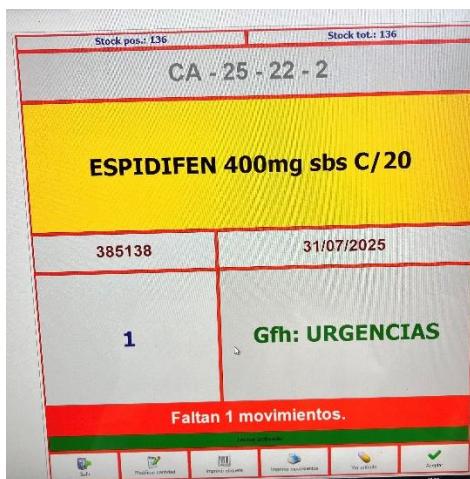

Pinchamos en Aceptar.

25: es la línea

22: es el cajón

2: es el compartimento.

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027




Comisión De Cuidados de Enfermería

El punto rojo es lo que nos indica de dónde tenemos que coger la medicación:



Aquí nos indica que la medicación estaría en la Nevera (NV) (viñeta a la izda de la pantalla)

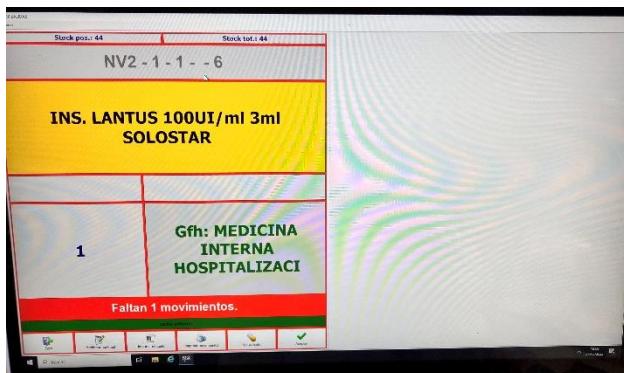

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023


Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027



Comisión De Cuidados de Enfermería


10. Una vez terminado nos saldrá esta pantalla:

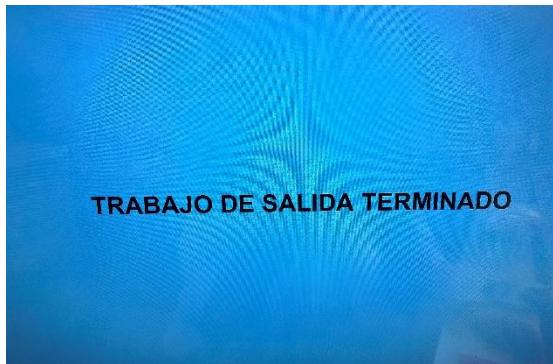

Pinchamos en cualquier punto de la

pantalla para pasar a la siguiente:

Y pincharemos en el icono Salir

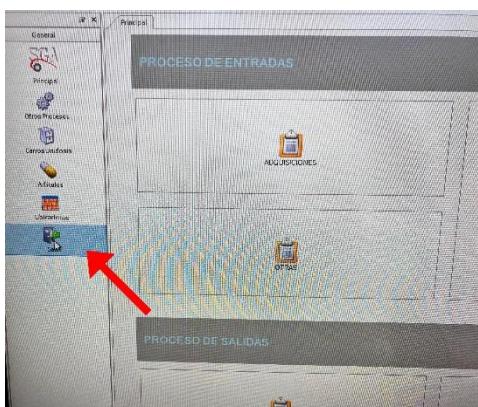

Y se nos quedaría de nuevo la pantalla de inicio. No hay que apagar el ordenador



Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027



Comisión De Cuidados de Enfermería

En caso de que las contraseñas no funcionen, podemos utilizar estas:

**Usuario: carruselfhc
Contraseña: carruselFhc**

7. Precauciones:

_Asegurarse que no haya ningún objeto que pueda impedir que el carrusel se detenga.

En los laterales del carrusel, hay 4 sensores, dos a cada lado, que si detectan un cajetín, bolsa o cualquier cosa, van a hacer que el Carrusel se detenga.



Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027



Comisión De Cuidados de Enfermería



Si el Carrusel se detiene por alguno de estos motivos, lo que tenemos que hacer es presionar el botón ON:



13. Autores:

14. Autores Revisión v0.1

Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027



Versión 0.1

Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 28/06/2023

Fecha de Implantación (v.0.1): 28/06/2023

Fecha de próxima revisión: 2027