



## **1. Definición**

Conjunto de actividades protocolarizadas y de calidad a realizar para poner en funcionamiento, limpiar y mantener a punto la lavadora “Matachana” proporcionando la máxima seguridad para el paciente y las personas de esterilización.

## **2. Objetivos**

- Obtener el máximo rendimiento de la lavadora.
- Conseguir una correcta limpieza del material.

## **3. Personas Necesarias**

- TCAE

## **4. Material Necesario**

- Cestas individuales
- Sal
- Detergente
- Lubricante
- Guantes

## **5. Descripción del Procedimiento**

Cronología de las actividades:

- Encendido de la lavadora:
  - Interruptor negro en posición 0, lavadora apagada.
  - Presionar el interruptor y dejarlo en posición I, lavadora encendida.
  - Introducir el material previamente lavado a mano en la cesta de la lavadora.
  - Presionar: Tecla 1 para lavado de material.
  - Tecla 4 para zuecos.
  - Presionar tecla “Start”
  - Cuando en la pantalla indique “Fin de ciclo” procederemos a la extracción del material y traslado del mismo al servicio de esterilización.

Versión 0.2  
Fecha de Revisión (v. 0.2) por la Comisión de Cuidados: 18/01/2017  
Fecha de Implantación (v.0.1):18/01/2017  
Fecha de próxima revisión: 2020



- Hoja de carga: Documento donde se indica el nº de lavado y la fecha, así como el nº de ciclo y material a lavar en cada carga.
- Limpieza de filtros: se realizará cada dos días.
- Reposición de sal, lubricante y detergente: siempre que sea necesario

## **6. Complicaciones**

En caso de cualquier fallo de la lavadora avisar al servicio de mantenimiento de FHC, así como apuntar las incidencias de fallos en el cuaderno habilitado para las mismas.

## **7. Criterios Normativos**

- El TCAE comprobará que la limpieza de los filtros es eficaz al 100%
- El TCAE comprobará que la reposición del lubricante es eficaz al 100%
- El TCAE comprobará que la reposición del detergente es eficaz al 100%
- El TCAE comprobará que la reposición de sal es eficaz al 100%

## **8. Criterios Explícitos**

Criterios de Evaluación	SI	NO	NO APLICABLE
¿Comprobó el TACE que los filtros están limpios?			
¿ Comprobó el TCAE que la reposición del lubricante es correcta?			
¿ Comprobó el TCAE que la reposición del detergente es correcta?			
¿ Comprobó el TCAE que la reposición de la sal es correcta?			

Versión 0.2  
Fecha de Revisión (v. 0.2) por la Comisión de Cuidados: 18/01/2017  
Fecha de Implantación (v.0.1):18/01/2017  
Fecha de próxima revisión: 2020



## **9. Bibliografía**

Manual de funcionamiento de lavadora Matachana.

## **10. Bibliografía Revisión v. 0.1**

Manual de funcionamiento de lavadora Matachana.

## **11. Autores**

Amelia Franco de Castro  
David Martín Villalón  
Laura Lozano Pérez  
Lorena Marín Adán  
Noelia Pérez Lázaro  
Pilar Tirado Borque  
Rebeca Martínez Tajadura


FUNDACIÓN  
HOSPITAL  
CALAHORRA

## **12. Autores Revisión v0.1**

Miembros de la Comisión de Cuidados de FHC 2010

## **13. Autores Revisión v0.2**

Miembros de la Comisión de Cuidados de FHC 2017

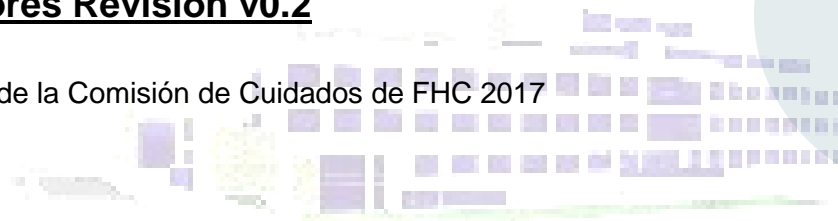

Versión 0.2  
Fecha de Revisión (v. 0.2) por la Comisión de Cuidados: 18/01/2017  
Fecha de Implantación (v.0.1):18/01/2017  
Fecha de próxima revisión: 2020